

Kflow[®] Epic

Short-Term Haemodialysis Catheters ST





Acceso temporal con excelentes tasas de flujo

Diseñado teniendo en cuenta la seguridad del paciente en mente

Los catéteres Kflow® Epic garantizan un rendimiento conocido y fiable para pacientes en hemodiálisis y aféresis.

Los catéteres de lumen doble y triple están disponibles con extensiones rectas, curvas y precurvadas. Todos incluyen un kit de inserción superior.

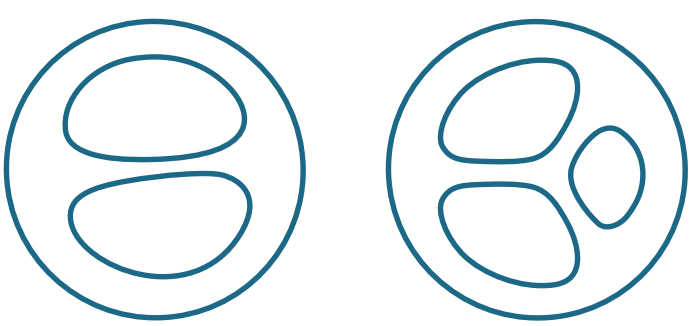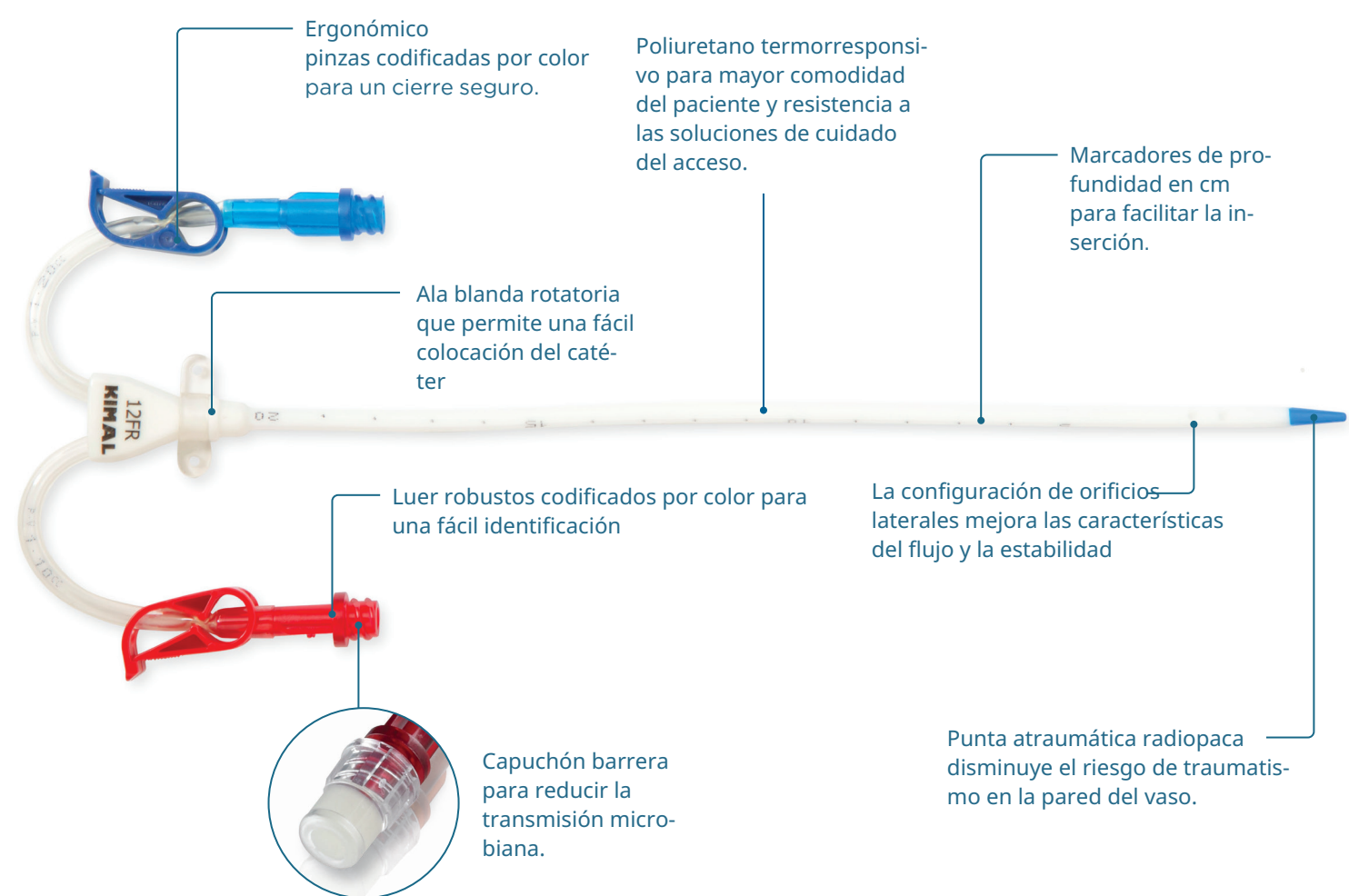

Lúmenes doble en D aseguran un flujo constante y bajas presiones.


¿POR QUÉ ELEGIR KFLOW EPIC?

- Caudales excelentes ✓
- Rendimiento fiable ✓
- Amplia variedad ✓
- Kit de inserción superior ✓


PRESIÓN DEL LUMEN VS. CAUDAL

Pruebas realizadas mediante un circuito extracorpóreo y un fluido con viscosidad igual (3,5 cP a 37 °C) a la sangre.

Kflow Epic Lumen Doble

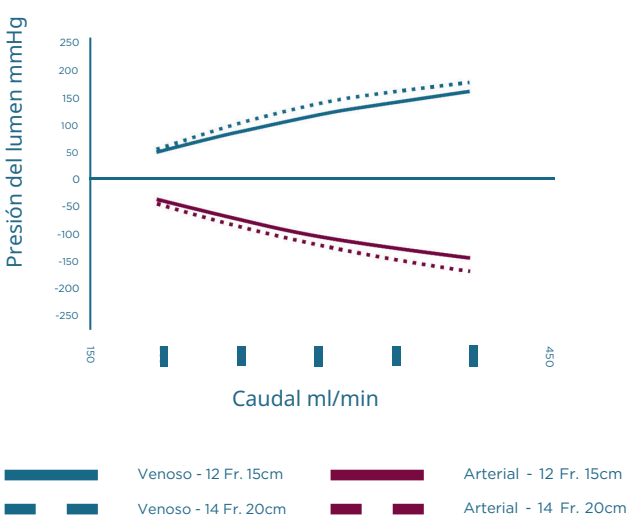

Kflow Epic Lumen Triple

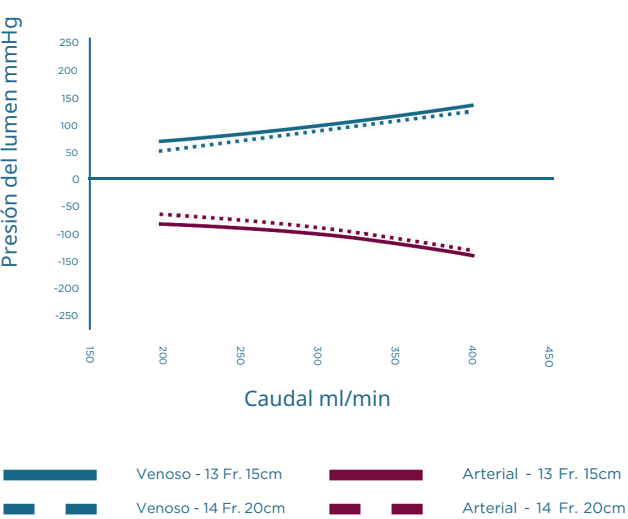

CADA KIT KFLOW EPIC CONTIENE:



Guía con punta en J de nitinol con dispensador de rueda para pulgar que proporciona un control sencillo.



Aguja introductora con válvula lateral permite la inserción de la guía sin pérdida sanguínea.


- Catéter de hemodiálisis Kflow Epic
- Aguja introductora 18G x 7 cm con válvula lateral
- Guía de nitinol con punta en J
- Dilatador vascular
- Jeringa de 5 ml
- Bisturí nº 11
- Tapones para inyección
- Apósito para catéter

GUÍAS DE REPUESTO			
KGW03570N	0.35"	70cm	Caja de 25
KGW03550N	0.35"	70cm	Caja de 25

	12 Fr. 15 cm		14 Fr. 20 cm	
	Arterial	Venoso	Arterial	Venoso
200 ml/min	-50	80	-60	60
300 ml/min	-130	135	-150	160
400 ml/min	-180	190	-210	210


	13 Fr. 15 cm		14 Fr. 20 cm	
	Arterial	Venoso	Arterial	Venoso
200 ml/min	-90	90	-90	90
300 ml/min	-110	125	-120	135
400 ml/min	-160	170	-170	180

Doble lumen

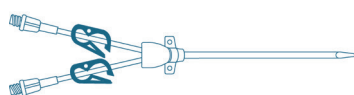

Extensiones rectas

RECTO		
KFE-TDL-0813-KP	8 Fr.	13cm
KFE-TDL-1215-K	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-K	12 Fr.	20cm
KFE-TDL-1224-K	12 Fr.	24cm
KFE-TDL-1415-K	14 Fr.	15cm
KFE-TDL-1420-K	14 Fr.	20cm

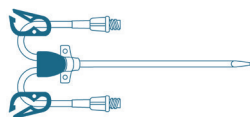

Extensiones curvas


Extensiones curvas		
KFE-TDL-1215-JK	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-JK	12 Fr.	20cm



Extensiones precurvadas


Precurvado		
KFE-TDL-1215-PCK	12 Fr.	15cm
KFE-TDL-1220-PCK	12 Fr.	20cm
KFE-TDL-1224-PCK	12 Fr.	24cm
KFE-TDL-1415-PCK	14 Fr.	15cm

TRIPLE LUMEN

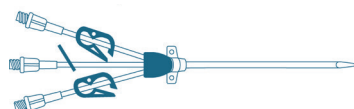


Extensiones rectas

RECTO		
KFE-TTL-1315-K	13 Fr.	15cm
KFE-TTL-1320-K	13 Fr.	20cm
KFE-TTL-1324-K	13 Fr.	24cm
KFE-TTL-1415-K	14 Fr.	15cm
KFE-TTL-1420-K	14 Fr.	20cm
KFE-TTL-1424-K	14 Fr.	24cm

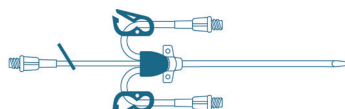

Extensiones curvas

Extensiones curvas		
KFE-TTL-1315-JK	13 Fr.	15cm
KFE-TTL-1320-JK	13 Fr.	20cm

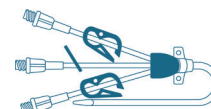

Extensiones precurvadas

Precurvado		
KFE-TTL-1415-PCK	14 Fr.	15cm

*Todos los kits de catéteres se suministran en cajas de 10 unidades.

Todos entregados con garantía

KIMAL
COMPROMISO

ENTREGA PUNTUAL | PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD | SIN SORPRESAS INESPERADAS

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PREMIADO | CONOCIMIENTO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Para más información, precios o muestras, consulte a su representante vascular local de Kimal o contacte con:

Reino Unido

Tel: +44 (0)845 437 9542

Fax: +44 (0)845 437 9544

Correo electrónico: customerservices@kimal.co.uk

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Tel: +97

16 552 8146 Fax: +97 16 5

52 8147 Correo electrónico

: mea@kimal.co.uk

INTERNACIONAL

Tel: +44 (0)845 437 9543

Fax: +44 (0)845 437 9544

Correo electrónico: internationalenquiries@kimal.co.uk

© 2019 Kimal PLC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá reproducirse en forma alguna ni por ningún medio sin autorización escrita de Kimal PLC.

Kimal PLC se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos en cualquier momento. Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

L-132A-0013-A1 | JULIO 2019

www.kimal.com

KIMAL
aportando innovación sanitaria